

iOP Dental Stone

- 各種印象材との適合性が良く、滑沢な印象面の模型が得られます。
- 2kg×5袋の個包装。収納容器に入れやすい使い切りタイプです。
- 外装はすべて段ボールを使用。分別の手間がなく、環境にも配慮しています。
- 外箱上部に持ち手が付いており、スムーズに持ち運ぶことができます。



- カラーラインナップ：イエロー
- 包装・標準価格：2kg×5袋入り

スピーディーな水馴染みと良好な練和性

ラバーボウルに計量器で量った適正量の水を入れてから、計量カップで石膏を加え練和します。



練和開始5秒後



練和開始10秒後



練和開始30秒後

水馴染みが良いため、練和不足の場合も見滑らかな面性状となりますが、物性の低下をひきおこす可能性があるため、手練和の場合は30～60秒間の確実な練り込みをしてください。

滑沢な模型面



印象材との適合性



物理的性質

試験方法：JIS T6605 により測定

混水量 粉 100g に対して	硬化時間	硬化膨張	圧縮強さ
24 ml	11 分	0.20%	49MPa

商品名：iOPデンタルストーン
一般医療機器（クラスⅠ） 歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品
一般的名称：歯科用硬質石膏
JAN：456022196164 届出番号：13B2X10233000060